



SLK ProfiSoft Comfort®

3-schichtige Komfortmatratze mit Belüftungskanälen zur Dekubitusprophylaxe und -therapie

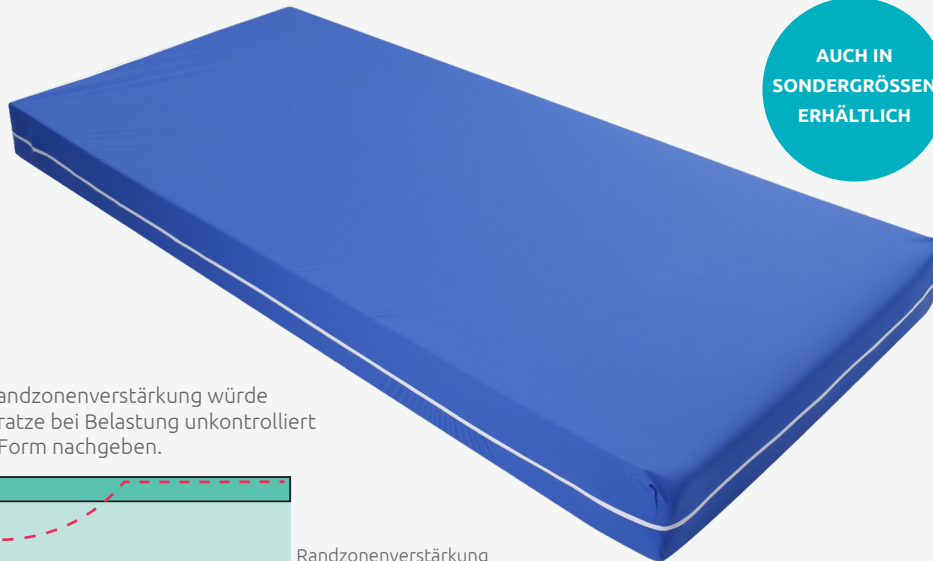


AUCH IN
SONDERGRÖSSEN
ERHÄLTlich

Ohne Randzonenverstärkung würde die Matratze bei Belastung unkontrolliert in ihrer Form nachgeben.

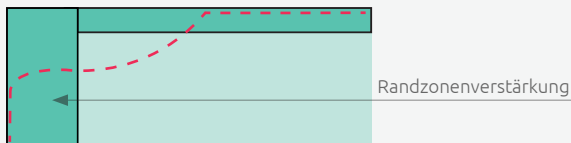

Mit Randzonenverstärkung bleibt sie stabil und gibt dem Patienten beim Aufstehen die Sicherheit und verhindert während des Liegens ein unplanmäßiges Abrutschen zur Seite.

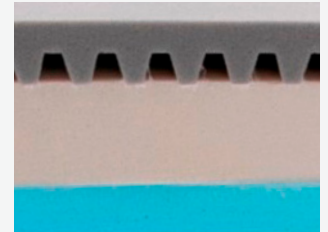

hervorragendes
Mikroklima durch
Belüftungskanäle



+ 220 cm Bezug

optionales
Verlängerungsset
(90 x 20 cm)

Fakten

- max. Patientengewicht: 180 kg
- Dekubitusstadium: 1 bis 3
- bei niedrigem bis hohem Risiko
- 3-schichtige Komfortmatratze mit speziellen Druckverteilungs- und Belüftungskanälen
- Reduzierung des Auflagedruckes an allen gefährdeten Körperzonen
- optimale Druckverteilung und einzigartiges Einsinkverhalten durch spezielle Kanalstrukturen
- Randzonenverstärkung
- hervorragendes Mikroklima
- maximaler Komfort in jeder Liegeposition
- Bezug schwer entflammbar, getestet nach CRIB 5 / OEKO-TEX Standard 100
- Schaumstoff FCKW-frei
- Zusätzlich: pfiffiges und ökonomisches Set für die Verlängerung unserer meistverkauften Antidekubitus-Schaumstoffmatratze
Verlängerungsset: 90 x 20 cm (20 cm langes Set bestehend aus 20 cm Schaumstoff + 220 cm Matratzenbezug)

Technische Daten / Maße

- für Bettmaß: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm
weitere Maße siehe Preisliste
- Höhe: 15 cm
weitere auf Anfrage
- SLK Bi-Stretch-Bezug, flüssigkeitsundurchlässig, waschbar bis 60° C
- Schaumstoff:
3-Schichten-Schaumstoff

Lieferumfang

- SLK ProfiSoft Comfort® 150 Anti-Dekubitus-Matratze inkl. Polyurethan-beschichtetem SLK Bi-Stretch-Bezug mit flüssigkeitsabweisendem Reißverschluss

Hilfsmittel-Nr.: 11.29.05.1034

Artikel-ID 10016 (90 x 200 cm), 10017 (100 x 200 cm)

Verlängerungsset Artikel-ID 10078 (90 x 20 cm)

Die hier dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen!

TECHNISCHE DATEN

ProfiSoftComfort

Klassifizierung:	Medizinprodukt der Klasse I (gemäß der der Verordnung MDR (EU) 2017/745)
Klimatische Bedingungen:	Umgebungstemperatur von 10° bis 40° C Luftfeuchtigkeit von 20% bis 75%
Gewährleistung:	24 Monate
Matratze	
Abmessungen (B/L/H):	90 x 200 x 15 cm 100 x 200 x 15 cm Sondermaße auf Anfrage
Zonen:	Formschnitt einseitig , Raumgewicht 40, Stauchhärte 25 Formschnitt beidseitig , Raumgewicht 40, Stauchhärte 37 Glatt , Raumgewicht 35, Stauchhärte 40
Gewicht:	ca. 8 kg (90 x 200 x 15 cm) ca. 9 kg (100 x 200 x 15 cm)
Zulässiges Patientengewicht:	von 30 kg bis 180 kg
Material:	Kaltschaum Polyether – Schaum Polyether - Schaum
Zertifikate:	Oekotex Standard 100

Bezug

Abmessungen:	für 90/100 x 200 x 15 cm
Material:	Polyurethan Bi-Stretch 175gr/qm
Zertifikate:	Oekotex Standard 100 – schwer entflammbar nach CRIB 5 Norm

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

	Waschtemperatur 90°
	Nicht bleichen
	Nicht bügeln
	Bei max. 60° trocknen
	Nicht chemisch reinigen
	Dieses Produkt entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in den grundlegenden Anforderungen der Verordnung MDR (EU) 2017/745 über Medizinprodukte genannt sind.
	Medical Device / Medizinprodukt

Alle Teile und Daten unterliegen der ständigen Weiterentwicklung und können somit von den aufgeführten Angaben abweichen.



Wellell Group

Version 2.9 - SLK 07/2024

SLK ProfiSoft Comfort 150

GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIGE INFORMATION

Die gelieferte Schaumstoffmatratze wurde für den Versand komprimiert. Nach dem Auspacken benötigt die Matratze eine gewisse Zeit, um sich wieder in die ursprüngliche Form auszudehnen. Daher sollte die Matratze vor der Benutzung einige Stunden ohne Belastung in waagerechter Position liegen. Die Matratze kann dann wieder wie gewohnt eingesetzt werden.

SLK Vertriebsgesellschaft mbH
Am Herdicksbach 18 · 45731 Waltrop
Telefon: +49(0)231 – 925360 – 0
Telefax: +49(0)231 – 925360 – 29
Email: info@slk-gmbh.de
Internet: www.slk-gmbh.de

Hilfsmittelnummer: 11.29.05.1034



INDIKATIONEN

Die ProfiSoftComfort 150 findet aufgrund ihres Aufbaus und ihrer Wirkungsweise Anwendung in der Dekubitusprophylaxe und -therapie bis Stadium III nach EPUAP. Durch die Auflagedruckreduktion können liegebedingte Schmerzen reduziert werden. Der hochwertige, profilierte Kaltschaum unterstützt die Wirbelsäule und sorgt für optimalen Liegekomfort. Der wasserdichte, atmungsaktive Bi-Stretch-Bezug ist wasserundurchlässig und waschbar. Das System ist für ein Körpergewicht von 30 bis 180 kg geeignet.

WIRKUNGSWEISE

Durch die profilierten Schichten von unterschiedlichen hochwertigen Schaumstoffen wird eine optimale Druckentlastung der Auflagefläche an den Körper und die jeweilige Liegeposition erreicht, der Auflagedruck wird dadurch minimiert. Erreicht wird dies durch die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Materials: Kaltschaum gewährleistet hohen Sitz-, Liege- und Schlafkomfort und besitzt eine ausgesprochen gute Anpassungsfähigkeit an Körper und Lattenroste. Dies hat zur Folge, dass die Matratze an allen gefährdeten Körperzonen eine Reduzierung des Auflagedruckes sicherstellt. Zusätzlich hat die Matratze spezielle Belüftungskanäle, um einem Wärme- und Feuchtigkeitsstau entgegen zu wirken.

WICHTIGE HINWEISE ZUM EINSATZ

Das System ProfiSoftComfort eignet sich zur Nutzung auf Pflegebetten und Standardbetten. Einstellungen am Bett können vorgenommen werden, ohne die

Funktionstüchtigkeit des Systems zu beeinträchtigen.

Die Matratze muss wie auf Abbildung 1 zu sehen ins Bett gelegt werden.

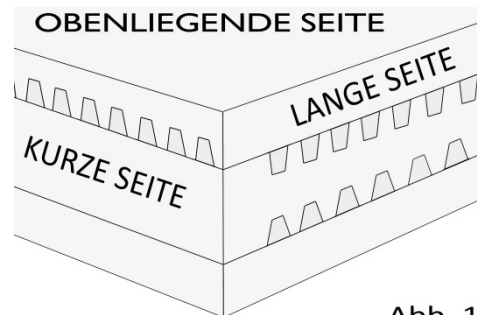


Abb. 1

Bei Verwendung des originalen SLK Inkontinenzbezuges ist die Seite, auf welcher der Patient liegt, durch die Beschriftung "Profi Soft Comfort" gekennzeichnet. Bei der Verwendung von Seitengittern an verstellbaren Betten für behinderte Menschen muss auf einen ausreichenden Abstand zwischen der Oberkante des Lagerungssystems und dem oberen Ende des Bettgitters geachtet werden (220 mm nach DIN 1970:2000). **Im Bedarfsfall sollten entsprechende Seitengittererhöhungen zum Schutz des Patienten angebracht werden.**

ANWENDUNGSRISIKEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Allergien

Die Matratzen dürfen nicht bei einer bestehenden Schaumstoffallergie eingesetzt werden.

Inkontinenz

Da Schaumstoff ein extrem saugfähiges und Flüssigkeit speicherndes Material ist, sollte bei vorliegender Inkontinenz immer ein flüssigkeitsundurchlässiger, jedoch gleichzeitig atmungsaktiver Bezug eingesetzt werden. Die Matratze wird standardmäßig mit einem geschlossenen Inkontinenzschutzbezug ausgeliefert.

Dieser Bezug ist nicht nur wasserdicht und atmungsaktiv, sondern zusätzlich auch noch antimikrobiell ausgestattet. Der Bezug kann jederzeit abgenommen und gewaschen werden (bei 60°C – 90°C). Siehe hierzu auch die folgenden Reinigungshinweise, sowie die am Bezug angebrachten Waschanleitungen.

REINIGUNG

Da das Reinigen von kompletten Matratzen im Allgemeinen schwierig ist, wird die Matratze standardmäßig mit einem geschlossen Inkontinenzschutzbezug, mit verdecktem Reißverschluss, ausgeliefert. Ein Verschmutzen des Kerns kann somit verhindert werden. Der Inkontinenzschutzbezug ist bei 60-90°C waschbar, und mit üblichen Desinfektionsmitteln behandelbar. Es ist darauf zu achten, dass das System von außen gut kenntlich gemacht und ein entsprechendes Anschreiben (gut sichtbar) beigefügt wird. Ein Hygieneplan (Merkblatt) über die Reinigung der SLK-Produkte kann in unserer Servicestation in Dortmund angefordert werden. Detaillierte Informationen zur Reinigung und Wiederaufbereitung des SLK-Systems erhalten Sie im SLK-Hygiene Center. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder unsere Servicestation in Waltrop.

WARTUNGS- UND PFLEGearBEITEN DURCH DEN ANWENDER

Es müssen keine Wartungs- und Pflegearbeiten durch den Anwender durchgeführt werden.